

Istruzioni brevi HEINE Cube

1. Collegare il proprio HEINE Cube con il cavo elettrico in dotazione. HEINE Cube si avvia con il tasto ON.



2. Collegare il proprio apparecchio con HEINE Cube WLAN. Questo si avvia automaticamente dopo circa 2 minuti.



SSID: HEINE-Cube
Password: heinecube

- 3a. Aprire sul proprio Mac / Windows / Tablet



uno dei normali browser



Immettere l'indirizzo HEINE Cube
192.168.88.1

Accedere

- 3b. Per gli iPhone* dalla versione 5s



Scaricare l'app HEINE Cube



Aprire l'app e immettere l'indirizzo
192.168.88.1

Accedere



LOGIN

Accedi per sbloccare l'applicazione

Utente 

Password 

Login!

