

Reconditionnement hygiénique

HEINE Examination Lights EL3 LED et EL 10 LED®

Informations générales en matière d'avertissement et de sécurité



AVERTISSEMENT ! Ce symbole indique une situation potentiellement dangereuse. Le non-respect des consignes peut entraîner des accidents corporels mineurs à modérés.



REMARQUE ! Ce symbole est utilisé pour des informations. Il est important mais ne renvoie pas à un danger.

	Les instructions relatives au reconditionnement hygiénique doivent être respectées sur la base des normes, lois et directives nationales. Les mesures de reconditionnement décrites ne remplacent pas les règles spécifiques en vigueur de votre institution/département.
	En cas de soupçons de contamination, procédez à un traitement hygiénique. HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG n'approuve que les agents et procédures répertoriés dans ces instructions. Le reconditionnement hygiénique doit être effectué par des personnes possédant d'expertise hygiénique adéquate. Veuillez tenir compte des instructions du fabricant relatives au fluide de reconditionnement appliqué. Évitez la pénétration de liquides dans le dispositif. Avant de procéder au traitement, débranchez le dispositif de l'alimentation électrique. Le bloc d'alimentation à fiche ne doit pas être nettoyé.
	Après le nettoyage, s'assurez que l'appareil est complètement sec avant de le réutiliser.
Limitations en matière de reconditionnement	Contrôlez à intervalles réguliers l'intégrité de l'appareil.



Désinfection par essuyage

1. Préparation

Désactivez le dispositif et le laisser refroidir.

2. Nettoyage et désinfection manuelle



Veillez à humidifier entièrement toutes les surfaces contaminées avec le produit désinfectant pendant le temps d'action total préconisé par le fabricant. Si nécessaire, augmentez le nombre de procédures d'essuyage et/ou le nombre d'essuyages.

Équipement

- Produit de désinfection :
alcoolique (p. ex. Incides N ou mikrozyd universal wipes),
d'ammonium quaternaire (p. ex. Cleanisept Wipes, Mikrobac Tissues ou Sani-Cloth AF3) ou
alcoolique + d'ammonium quaternaire (p. ex. Super Sani-Cloth)

Mise en œuvre

- Nettoyez et désinfectez manuellement les surfaces contaminées en les essuyant.
- Essuyez bien les surfaces que vous touchez.
- Pour éliminer le désinfectant et procéder ensuite au séchage, suivez les instructions fournies par le fabricant du désinfectant.
- Les résidus de produit de retraitement sur les optiques peuvent être enlevés avec une lingette microfibrilles sèche et aseptique.
- Nettoyez le câble et le bloc d'alimentation uniquement en cas de nécessité et avec un chiffon sec.

3. Inspection et test de fonctionnement



- Vérifiez avant chaque utilisation le bon fonctionnement de l'appareil. Ne pas utiliser l'appareil s'il est endommagé.

4. Stockage

La stocker de sorte à la protéger contre toute recontamination, de la poussière et de l'humidité.

