

Reconditionnement hygiénique

HEINE Charger 30

Informations générales en matière d'avertissement et de sécurité



AVERTISSEMENT! Ce symbole indique une situation potentiellement dangereuse. Le non-respect des consignes peut entraîner des accidents corporels mineurs à modérés.



REMARQUE! Ce symbole est utilisé pour des informations. Il est important mais ne renvoie pas à un danger.

	<p>Les instructions relatives au reconditionnement hygiénique doivent être respectées sur la base des normes, lois et directives nationales.</p> <p>Les mesures de reconditionnement décrites ne remplacent pas les règles spécifiques en vigueur de votre institution/département.</p>
	<p>En cas de soupçons de contamination, procéder à un traitement hygiénique.</p> <p>HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG n'approuve que les agents et procédures répertoriés dans ces instructions.</p> <p>Le reconditionnement hygiénique doit être effectué par des personnes possédant d'expertise hygiénique adéquate.</p> <p>Veuillez tenir compte des instructions du fabricant relatives au fluide de reconditionnement appliqué.</p> <p>Éviter la pénétration de liquides dans le dispositif.</p> <p>Avant de procéder au traitement, débrancher le dispositif de l'alimentation électrique.</p> <p>Le bloc d'alimentation à fiche ne doit pas être nettoyé.</p> <p>Les procédures de reconditionnement décrites sont représentées en même temps que les compatibilités matérielles correspondantes. Le reconditionnement doit être effectué en accord avec une procédure de conditionnement approuvée. HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG ne peut pas garantir la désinfection de ces procédures. Ceci doit être validé par l'utilisateur, en l'occurrence l'hôpital ou les fabricants d'équipement de reconditionnement.</p>
	<p>Ne placez que des appareils retraités dans le chargeur.</p> <p>Après le nettoyage, s'assurer que l'appareil est complètement sec avant de le réutiliser.</p>
<p>Limitations en matière de reconditionnement</p>	<p>Contrôler à intervalles réguliers l'intégrité de l'appareil.</p>



Désinfection par essuyage

1. Nettoyage et désinfection manuelle

Veillez à humidifier entièrement toutes les surfaces contaminées avec le produit désinfectant pendant le temps d'action total préconisé par le fabricant. Si nécessaire, augmenter le nombre de procédures d'essuyage et/ou le nombre d'essuyages.

Équipement

- Produit de désinfection:
alcoolique (p. ex. Incides N ou mikrozid universal wipes),
ou
alcoolique + d'ammonium quaternaire (p. ex. Super Sani-Cloth)
- Si vous utilisez des agents de reconditionnement autres que ceux recommandés, assurez-vous qu'ils ne soient pas moussants.

Mise en œuvre

- Nettoyez et désinfecter manuellement les surfaces contaminées en les essuyant.
- Faire tout particulièrement attention aux zones difficiles d'accès.
- Pour éliminer le désinfectant et procéder ensuite au séchage, suivre les instructions fournies par le fabricant du désinfectant.

2. Inspection et test de fonctionnement

- Vérifier avant l'utilisation le bon fonctionnement de l'appareil. Ne pas utiliser l'appareil s'il est endommagé.

