


Universal Smartphone Connector para HEINE DELTA 30 y DELTAone. Documentación dermatoscópica digital con la cámara del smartphone.

¡ASÍ ES MUY SENCILLO!



1 Con el HEINE Universal Smartphone Connector puede usar prácticamente cualquier smartphone, independientemente del sistema operativo (Android, Windows, ...). Para la mayoría de los modelos de iPhone*, HEINE cuenta en su cartera de productos con soportes a medida que ya llevan pegado el adaptador.

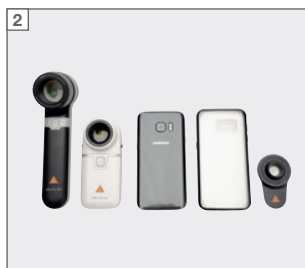

2 Por tanto, necesita un DELTA 30 o un DELTAone, el Connector y un soporte adecuado para su smartphone**.




3 El Connector solo es apto para soportes de teléfono móvil con superficie lisa de plástico duro, la cámara no puede sobresalir del soporte.



4 Si su smartphone solo tiene una cámara, fije el Connector por el centro delante de dicha cámara.



Si su smartphone tiene varias cámaras, primero debe comprobar cuál de ellas es la cámara principal: coloque el Connector en la cara trasera del smartphone de forma que una de las lentes de la cámara quede en el centro. ¿Es claro el campo de visión sobre el objeto en la vista de cámara? Si todo es correcto, pegue el Connector delante de esa cámara.

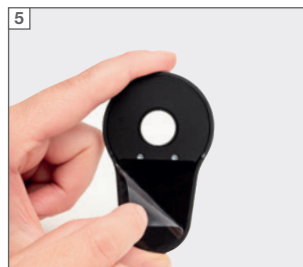

5 Retire la película protectora y presione firmemente el Connector en el centro delante de la lente de cámara seleccionada.



6 ¡Ya casi está listo!



7 El imán del Connector sujeta ahora el teléfono móvil junto con el soporte sobre el anillo de enfoque del dermatoscopio.

Entonces ya puede hacer fotos como de costumbre con la función de cámara de su smartphone.

*Apple, el logotipo de Apple, e iPhone son marcas de la empresa Apple Inc., registradas en los EE.UU. y en otros países. HEINE recomienda usar un iPhone a partir de la versión 6. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños.

**El smartphone y el soporte para teléfono móvil no se incluyen en el material suministrado.