

Ritrattamento igienico

HEINE GAMMA Stethoscope 3.1, 3.2 und 3.3

Avvertenza generale e informazioni sulla sicurezza



AVVERTENZA! Questa segnalazione indica una situazione potenzialmente pericolosa. Il mancato rispetto di questa avvertenza può portare a lesioni di piccola o media portata.

NOTA! Questo simbolo indica informazioni utili che sono importanti ma non associate a pericoli.

	<p>Attenersi alle istruzioni per il ritrattamento igienico secondo gli standard nazionali, le leggi e le linee guida. Le misure di ritrattamento descritte non sostituiscono le regole specifiche applicabili presso la vostra istituzione / il vostro dipartimento.</p>
	<p>Se si sospetta una contaminazione, procedere ad una igienizzazione. HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG approva unicamente gli agenti e le procedure elencati nelle presenti istruzioni. Il ritrattamento igienico deve essere eseguito da persone con competenza igienica adeguata. Attenersi alle istruzioni dei produttori delle sostanze di preparazione. Se vengono utilizzati dei processi di ritrattamento igienico diversi da quelli descritti nelle presenti istruzioni, è necessario in ogni caso ricorrere a processi di ritrattamento igienico omologati e convalidati. Questi devono essere convalidati dall'utilizzatore, ad esempio dall'ospedale o dal produttore dei dispositivi per i processi di ritrattamento igienico. Non devono essere utilizzati processi di sterilizzazione o di ritrattamento igienico a macchina. Non collocare il liquido detergente e proteggere dalla sporcizia (in modo che nel sistema di cavità dello stetoscopio non finiscano liquidi detergenti o corpi solidi)</p>
	<p>Assicurarsi che lo strumento sia completamente asciutto dopo la pulizia, prima di riutilizzarlo.</p>
<p>Limiti del ritrattamento</p>	<p>Verificare periodicamente che il dispositivo sia integro.</p>

Disinfezione per strofinamento

1. Pulizia manuale e disinfezione



Prestare attenzione ad umettare completamente tutte le superfici contaminate per tutto il tempo di applicazione indicato dal produttore della soluzione disinfettante. Aumentare eventualmente il numero di procedure di strofinamento e/o il numero di passaggi.

Prima del ritrattamento, chiudere l'apertura dello speculum per evitare la penetrazione di liquidi: per farlo, tenere in una mano il raccordo del tubo flessibile leggermente arcuato della testina e ruotare la testina di 180° con l'altra mano, fino a udire un clic chiaro.

Attrezzatura

- Detergente, se necessario: enzimatica (ad es. neodisher MediClean)
- Salviette disinfettanti: a base di sali d'ammonio quaternario (ad es. Cleanisept Wipes , Mikrobac Tissues o Sani-Cloth AF3)

Implementazione

- Per lo sporco più ostinato, è possibile pulire con una salvietta imbevuta di agente di pulizia prima della disinfezione con una salvietta disinfettante.
- Pulire e disinfettare il dispositivo manualmente.
- Prestare particolare attenzione alle aree di difficile.
- Strofinare con cura le aree con cui si entra in contatto.
- Dopo la disinfezione della testina, usare un nuovo panno disinfettante.
- Un ritrattamento completo dovrebbe essere effettuato regolarmente. A tale fine, prima del ritrattamento, togliere l'anello di protezione dal freddo e l'anello di protezione della campana e ritrarli separatamente dallo stetoscopio attraverso una disinfezione con un panno pulente.
 - Tergere almeno tre volte l'anello di protezione dal freddo e l'anello di protezione della campana con movimenti circolari sulle superfici interne ed esterne.
 - Usare un nuovo panno disinfettante.
 - Tergere almeno tre volte la membrana della testina con movimenti circolari.
 - Usare un nuovo panno disinfettante.
 - Tergere il lato della campana della testina almeno tre volte con movimenti verticali, orizzontali e circolari. Prestare particolare attenzione ai punti difficili da raggiungere e all'apertura della campana.
 - Usare un nuovo panno disinfettante.
 - Tergere almeno tre volte il tubo flessibile dello stetoscopio con dei movimenti circolari, orizzontali e verticali. Prestare particolare attenzione alla zona della biforcazione del tubo flessibile dello stetoscopio.
 - Tergere quindi tre volte l'archetto auricolare con dei movimenti orizzontali e verticali. Prestare particolare attenzione alla zona di passaggio verso il tubo flessibile dello stetoscopio.
 - Tergere tre volte le olive auricolari con dei movimenti circolari. Prestare particolare attenzione alle aperture delle olive auricolari.
 - Tergere a fondo l'area di passaggio dalle olive auricolari all'archetto auricolare.
- Per rimuovere il disinfettante e quindi asciugare, seguire le istruzioni fornite dal produttore del disinfettante.
- Prima del riassetto, verificare che tutti i componenti siano completamente asciutti.



Ispezione e test di funzionamento

- Verificare la presenza di eventuali impurità o contaminanti visibili sul l'apparecchio. Eventualmente igienizzare nuovamente.
- Non utilizzate l'apparecchio se rilevate danneggiamenti.

3. Conservazione

- Conservare in modo da proteggere da ricontaminazione, polvere e umidità.