


# Certaines créatures sont peut-être mignonnes, mais elles n'ont pas leur place sur le vidéo laryngoscope HEINE visionPRO.

Le virus varicelle-zona, la coqueluche, le SARM et bien d'autres germes, virus et bactéries ont leur place dans les manuels de médecine. Pas sur le vidéo laryngoscope HEINE visionPRO. Grâce à son design intelligent et à smoothSURFACE HEINE, il est facile à retraiter.

## Retraitement hygiénique du vidéo laryngoscope HEINE visionPRO

- 1. Retirez et jetez la lame directement après utilisation**

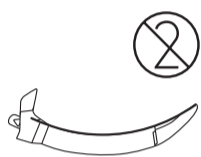


- 2. Nettoyez le laryngoscope HEINE visionPRO peu de temps après l'intubation, par ex. avec un tissu de nettoyage humide pour éviter que la saleté ne sèche sur l'instrument**



- 3. Effectuez une désinfection de niveau intermédiaire pour le vidéo laryngoscope assemblé**

Vidéo laryngoscope assemblé

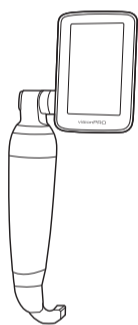

### ► DÉSINFECTION PAR ESSUYAGE

- Lingettes de désinfection : ayant une revendication d'activité contre le Mycobacterium tuberculosis (bacille de Koch) et l'hépatite B enregistrée par l'EPA
- Répétez la désinfection des différentes zones 3 fois. Essayez avec des mouvements horizontaux, verticaux et rotatifs – comme décrit dans les instructions de retraitement
- Enlevez le(s) résidu(s) avec un chiffon imbibé d'eau distillée ou d'eau au moins potable (selon les instructions du fabricant du désinfectant) et séchez le vidéo laryngoscope conformément aux instructions du fabricant du désinfectant

- 4. Si nécessaire, choisissez un niveau de retraitement supplémentaire pour la poignée (la réglementation de votre État ou de votre région peut l'exiger)**

### 4.1. DÉSINFECTION DE HAUT NIVEAU

#### ► DÉSINFECTION PAR IMMERSION

##### NETTOYAGE MANUEL

- Agent nettoyant : enzymatique ou neutre à légèrement alcalin
- Trempez la poignée immergée dans la solution de nettoyage
- Nettoyez toutes les surfaces par brossage (poignée toujours immergée)
- Après le nettoyage, il est important d'enlever le produit de nettoyage et de sécher l'instrument. Pour ce faire, suivez les instructions fournies par le fabricant du produit de nettoyage

##### DÉSINFECTION PAR IMMERSION

- Désinfectant : orthophtaldéhyde (par ex. Cidex\* OPA)
- Immergez complètement la poignée dans la solution désinfectante. Portez une attention particulière aux concentrations (0,55% min.), aux températures (20°C min.) et aux temps d'exposition (12 minutes min.)
- Retirez la poignée de la solution, immergez-la complètement dans une grande quantité d'eau pendant au moins 1 minute et rincez-la soigneusement. Jetez l'eau de rinçage
- Répétez l'opération 2 fois de plus pour un total de 3 rinçages dans de l'eau fraîche en abondance

Poignée uniquement !



### 4.2. STÉRILISATION

#### ► STÉRILISATION À BASSE TEMPÉRATURE

##### NETTOYAGE MANUEL

- Agent nettoyant : enzymatique ou neutre à légèrement alcalin
- Trempez la poignée immergée dans la solution de nettoyage
- Nettoyez toutes les surfaces par brossage (poignée toujours immergée)
- Après le nettoyage, il est important d'enlever le produit de nettoyage et de sécher l'instrument. Pour ce faire, suivez les instructions fournies par le fabricant du produit de nettoyage

##### DÉSINFECTION PAR IMMERSION (Votre réglementation locale peut exiger une désinfection par immersion avant de stériliser votre poignée)

- Désinfectant : orthophtaldéhyde (par ex. Cidex\* OPA)
- Immergez complètement la poignée dans la solution désinfectante. Portez une attention particulière aux concentrations (0,55% min.), aux températures (20°C min.) et aux temps d'exposition (12 minutes min.)
- Retirez la poignée de la solution, immergez-la complètement dans une grande quantité d'eau pendant au moins 1 minute et rincez-la soigneusement. Jetez l'eau de rinçage
- Répétez l'opération 2 fois de plus pour un total de 3 rinçages dans de l'eau fraîche en abondance

##### STERRAD\*

- STERRAD\* 100NX\* (flex cycle)

Poignée uniquement !



\*All names marked with \* are trademarks of ASP Global Manufacturing, GmbH.

