


Notice adaptateur smartphone universel DELTA 30 PRO, DELTA 30 et DELTAone de HEINE

Documentation numérique en dermatoscopie avec la caméra de votre smartphone.

SIMPLE COMME BONJOUR!



1 Vous pouvez utiliser tout type de téléphone, quel que soit le système d'exploitation (Android, Windows, ...) avec l'adaptateur smartphone universel de HEINE. Pour la plupart des modèles d'iPhone*, HEINE propose une gamme de coques sur lesquels l'adaptateur est déjà solidement collé.

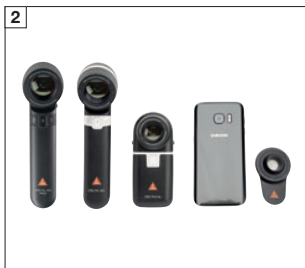

2 Vous aurez besoin d'un DELTA 30 PRO, DELTA 30 ou DELTAone, de l'adaptateur et d'une coque de téléphone portable** adaptée à votre smartphone.



3 L'adaptateur ne convient qu'aux coques de téléphones portables à surface lisse en plastique dur, la caméra ne devant pas dépasser de la coque.



4 Si votre smartphone n'a qu'une seule caméra, fixez l'adaptateur au milieu, devant cette caméra.



Si votre smartphone est équipé de plusieurs caméras, vous devez d'abord vérifier quelle est la caméra principale: placez l'adaptateur à l'arrière du smartphone de manière à ce qu'une des caméras se trouve au milieu. Le champ de vision est-il libre? Si c'est le cas, collez l'adaptateur devant cette caméra.



5 Retirez la feuille de protection et appuyez fermement au milieu de l'adaptateur, devant la caméra sélectionnée.



6 Vous y êtes presque!



7 Le dermatoscope peut être utilisé en connectant la bague de mise au point à l'aimant de l'adaptateur, désormais collé sur la coque de votre téléphone.

Vous pouvez maintenant prendre des photos avec votre smartphone comme vous en avez l'habitude.

*Apple, le logo d'Apple, et l'iPhone sont des marques de Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. HEINE recommande l'utilisation d'un iPhone à partir de la version 6. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs titulaires respectifs.

**Le smartphone et la coque du téléphone portable ne sont pas inclus dans la livraison.

